




Manuale utente

Leggi attentamente questo manuale prima dell'uso e conservalo per riferimenti futuri.

### Panoramica del dispositivo

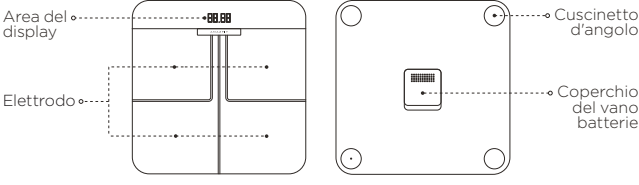

### Installazione dell'app

Scansiona il codice QR di seguito per scaricare l'app Zepp (di seguito "l'app") oppure cerca "Zepp" nell'app store del telefono per scaricare e installare l'app.

Note:


1. Per un'esperienza ottimale, aggiorna l'app alla versione più recente come indicato.
2. Il sistema è compatibile con Android 5.0 o iOS 10.0 e versioni successive



1

### Installazione delle batterie

Apri il coperchio del vano batterie e inserisci quattro batterie AAA (mini-stilo) nelle direzioni indicate all'interno del vano batterie.

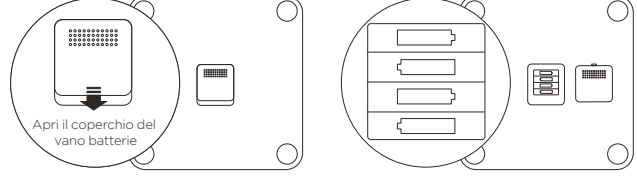

### Associazione della bilancia

Apri l'app Zepp, registrati o accedi con il tuo account, quindi associa la bilancia al tuo account e inserisci i tuoi dati personali seguendo le istruzioni sullo schermo.

Dopo aver associato la bilancia, puoi controllare le registrazioni del peso e le informazioni sulla composizione corporea tramite l'app.

I tuoi dati personali vengono usati per analizzare la composizione corporea. Per garantire l'accuratezza dei risultati, inserisci dati personali accurati.

2

### Configurazione del Wi-Fi

Dopo la prima associazione, fai clic su Configura Wi-Fi come richiesto, seleziona una connessione Wi-Fi e inserisci la password, quindi attendi il completamento della configurazione.


Note:

1. La bilancia supporta solo connessioni Wi-Fi a 2,4 GHz, non connessioni Wi-Fi a 5 GHz.
2. Se preferisci configurare il Wi-Fi in un secondo momento, puoi aprire l'app, salire sulla bilancia per connetterti all'app, fare clic su Configura Wi-Fi, selezionare una connessione Wi-Fi e inserire la password per completare la configurazione.

3

### Inizio della misurazione

Posiziona la bilancia su una superficie rigida e in piano. Sali a piedi nudi sulla bilancia come mostrato in figura. Assicurati che la pelle dei piedi sia a contatto con i quattro elettrodi sulla bilancia. Dopo aver misurato il peso, la bilancia inizierà a calcolare la composizione corporea, come il tasso di grasso corporeo, la frequenza cardiaca. Durante la misurazione, vedrai in successione ciascun tipo di informazione rilevata sullo schermo della bilancia. Una volta completata la misurazione e sincronizzati i dati, potrai visualizzare i dettagli nell'app.

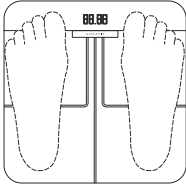

Note:

1. I dati sulla composizione corporea forniti da questa bilancia sono da considerarsi un riferimento e non costituiscono un parere medico.
2. Spostare o urtare la bilancia può influire sulla precisione: in questo caso, ripeti l'operazione per assicurarti che la misurazione sia accurata.

4

### Simboli dei messaggi

|  |                           |  |                                                              |
|--|---------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
|  | Wi-Fi                     |  | Disattivazione della misurazione della composizione corporea |
|  | Bluetooth                 |  | Tasso di grasso corporeo                                     |
|  | Massa muscolare           |  | Percentuale d'acqua corporea                                 |
|  | Percentuale di proteine   |  | Massa ossea                                                  |
|  | Grado di grasso viscerale |  | Metabolismo basale                                           |
|  | Grasso sottocutaneo       |  | Muscolatura scheletrica                                      |
|  | BMI/IMC                   |  | Età fisica                                                   |
|  | Frequenza cardiaca        |  | Sovrappeso                                                   |

### Selezione di un'unità di peso

La bilancia calcola il peso in chilogrammi (kg) per impostazione predefinita. Puoi cambiare l'unità di peso della bilancia tramite le impostazioni del dispositivo nell'app. La bilancia può visualizzare il peso in chilogrammi (kg), libbre (lb) e stone (st).

5

### Precauzioni

1. Questa bilancia non deve essere utilizzata da persone portatrici di pacemaker o con altri dispositivi medici impiantati.
2. Per evitare di scivolare, non posizionare la bilancia su una superficie scivolosa e non usarla quando i piedi o la bilancia sono bagnati.
3. Resta sempre al centro della bilancia, per evitare che si ribalti accidentalmente durante la misurazione.
4. Usa la bilancia solo in un ambiente asciutto e non immergerla in acqua.
5. Pulisci la superficie della bilancia con un panno umido e un detergente delicato. Non usare solventi organici o altri prodotti chimici.
6. Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, sussiste il rischio di esplosione. Smaltisci le batterie esaurite attenendoti alle istruzioni.
7. Dopo che le batterie sono esaurite, rimuovile immediatamente per evitare possibili perdite e corrosione.
8. Ne è sconsigliato l'uso a donne in gravidanza. Per le donne in gravidanza, disattivare la "misurazione della composizione corporea" prima della misurazione del peso.
9. Agli atleti professionisti e alle persone che fanno esercizio fisico regolarmente consigliamo di usare la "Modalità sport" per pesarsi.
10. Non pesarti quando non ti senti bene (febbre, diarrea, stato di ebbrezza), quando soffri di disidratazione estrema, dopo la sauna o i bagni termali o dopo un intenso esercizio fisico.
11. I dati di misurazione della composizione corporea possono variare quando la bilancia viene usata da persone con presidi medici metallici impiantati, che assumono medicinali che inducono cambiamenti nella ritenzione idrica o con cute particolarmente spessa sulla pianta dei piedi, oppure da alcuni altri soggetti con condizioni speciali.

6

### Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

Tutti i prodotti con questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, secondo la direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati. Per proteggere la salute e l'ambiente, consegna i rifiuti delle apparecchiature a un punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, secondo quanto stabilito dalle autorità pubbliche statali e locali. Il corretto smaltimento e riciclaggio aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Contatta l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla posizione e sui termini e le condizioni di questi punti di raccolta.

### Certificazioni e omologazioni di sicurezza

Anhui Huami Healthcare Co.,Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo A2003 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://en.amazfit.com/support.html>

7

### Specifiche

Nome: Amazfit Smart Scale  
Unità di pesatura: kg / lbs  
Incrementi: 0,1 kg / lbs  
Frequenza Wi-Fi: 2412 - 2472 MHz  
Potenza massima Wi-Fi: < 20 mW  
Frequenza Bluetooth: 2402 - 2480 MHz  
Potenza massima Bluetooth: < 3 mW  
Connettività wireless: Wi-Fi a 2,4 GHz 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 a 2,4 GHz  
Temperatura operativa: 5 °C - 40 °C  
Alimentazione: 4 batterie AAA da 1,5 V  
Materiale della cassa: vetro temperato, plastica tecnica ABS  
Compatibile con: Android 5.0 o iOS 10.0 e versioni successive  
Contenuto della confezione: Amazfit Smart Scale, manuale utente

### Garanzia e politiche di reso

La Garanzia limitata Amazfit copre i prodotti Amazfit contro i difetti di fabbricazione a partire dalla data di acquisto originale. Il periodo di garanzia è di 12 mesi o altro periodo in base alle leggi sulla protezione dei consumatori applicabili nel Paese di acquisto del cliente. La nostra garanzia è supplementare ai diritti di cui gode il cliente ai sensi della legge vigente, e non intende sostituirsi agli stessi.

Sito Web ufficiale: [en.amazfit.com](http://en.amazfit.com)  
Assistenza: [support.amazfit.com](mailto:support.amazfit.com)

8